

Informacja dotycząca daty przydatności wyrobów medycznych poddawanych procesom dekontaminacji w Centralnej Sterylizatorni SPSKM ŚUM

Pracownicy Centralnej Sterylizatorni gwarantują sterylność wydawanych pakietów z jednostki na podstawie narzędzi/wskaźników kontroli procesu sterylizacji.

Zachowanie sterylności narzędzi poddawanych procesom dekontaminacji w Centralnej Sterylizatorni SPSK-M ŚUM przez cały czas trwania określony datą przydatności, **jest możliwy tylko i wyłącznie przy zachowaniu przez użytkownika/ odbiorcę usług, odpowiednich zasad transportu oraz sposobu magazynowania, przechowywania i stosowania/otwierania pakietów sterylnych.**

1. transport pakietów sterylnych w szczelnie zamkniętych pojemnikach
2. pakiety sterylne magazynowane, przechowywane dodatkowo zabezpieczone opakowaniami p-pyłowymi/ p-kurzynymi
3. pakiet sterylny ułożony w sposób swobodny, uniemożliwiający zagięcia bariery sterylnej/opakowania sterylizacyjnego pierwotnego.
4. pakiety sterylne przechowywane w zamkniętych szafach, szufladach w miejscach o ograniczonym dostępie dla osób postronnych
5. pomieszczenia magazynowania i przechowywania pakietów sterylnych z zachowaniem odpowiedniej temperatury i wilgotności pomieszczenia
6. pakiety sterylne otwierane w sposób aseptyczny

Kierownik Centralnej
Sterylizatorni SPSK-M ŚUM

